

tau-kit

INDICACIONES GENERALES

Consideraciones previas:

Los antibióticos y antiácidos, entre otros medicamentos, interfieren en la determinación del *Helicobacter pylori* empleando esta técnica, por lo que deberá ser informado a su médico quien procederá a suspenderlos bajo el siguiente esquema:


- En caso de antibióticos 4 semanas de suspensión previa a la realización del estudio.
- En caso de antiácidos 2 semanas de suspensión previa a la realización del estudio.

Deberá asistir con por lo menos, 8 horas de ayuno y sin fumar antes de realizarse el test.


Descripción del Test:

El test de aliento para detectar el *Helicobacter pylori* es de fácil realización, no invasivo, posee un elevado porcentaje de exactitud diagnóstica, detecta el grado de colonización del tracto gastrointestinal y resulta muy útil para el seguimiento de pacientes. Su uso está recomendado en pacientes pediátricos y embarazadas.


Procedimiento:

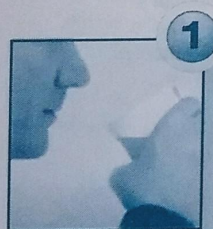


1
Administrar una bebida rica en ácido cítrico.

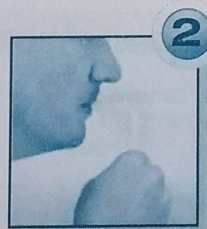


2
Diez minutos después llevar a cabo la toma de muestra, por duplicado, para realizar la determinación basal. Espirar suavemente hasta que la superficie interna del tubo colector se cubra de vapor.

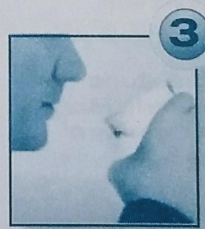


3
Disolver un comprimido de Tau-kit en agua e ingerirlo inmediatamente.

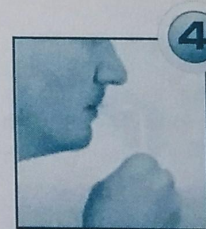

4
Treinta minutos después llevar a cabo la toma de muestra por duplicado. Espirar suavemente hasta que la superficie interna del tubo colector se cubra de vapor.

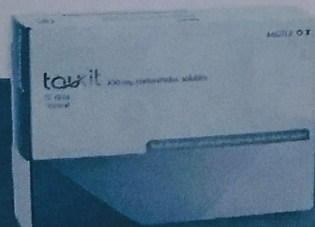

Duración:

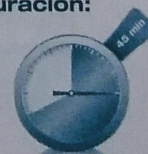

LABORATORIOS BACON S.A.I.C.

Tel +54(11) 4709-0171 | Fax +54(11) 4709-2636 | www.bacon.com.ar | ventas@bacon.com.ar